

**Material:** Anátomo Patológico

**Sinônimo:** Histopatológico

**Volume:** Fragmentos pequenos de órgãos e tecidos

**Método:** Coloração por Hematoxilina e Eosina

**Volume Lab.:** Fragmentos pequenos de órgãos e tecidos

**Rotina:** Diária

**Temperatura:** Ambiente

**Coleta:** Por procedimentos cirúrgicos. Para a histopatologia convencional, o fixador mais comum é a solução aquosa de formalina (formol 40% diluído em água numa concentração de 1:10) a 10%. O volume ideal corresponde a cerca de 20 vezes o volume da peça a ser fixada. Após 24h em amostras menores que 3 cm e 48h em amostras maiores que 3 cm, o fixador pode ser escorrido para envio do material sem risco de derrama de líquido. Os frascos devem estar rotulados com a correta identificação do paciente. Para casos de revisão de casos ou de imunohistoquímica, enviar blocos de parafina com material histológico ou fragmentos de tecido previamente fixados acompanhados de um relatório ou solicitação médica e da cópia do laudo anterior

**Código SUS:**

**Código CBHPM:** 0.00.00.00-0

**Interpretação:**

As alterações observadas (alterações inflamatórias, reparativas, degenerativas, infecciosas ou neoplásicas), serão relatadas na conclusão.

**Referência:**